

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠM TIÊM MÀU

Hướng dẫn sử dụng:



Ký hiệu:

	Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide		Sản phẩm không có Latex
	Mã lô hàng		Sản phẩm có phthalates (DEHP)
	Mã sản phẩm		Sản phẩm không có DEHP
	Hạn sử dụng		Bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo
	Không tái sử dụng		Tránh xa ánh nắng mặt trời
	Ngày sản xuất		Không sử dụng khi bao bì bị hư hỏng
	Nhà sản xuất		Tham khảo HDSD trước khi sử dụng

Mục đích sử dụng của sản phẩm:

Bơm tiêm được dùng để tiêm và hút các dung dịch cho các dụng dịch y tế.

Miễn trừ trách nhiệm:

Các chỉ dẫn sau đây liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng sản phẩm và người sử dụng nhất thiết phải qua đào tạo. Các chỉ dẫn này không đại diện hết cho các hướng dẫn y khoa và không thể thay thế cho lời khuyên cũng như các phán đoán của bác sỹ.

Có nhiều loại bơm tiêm khác nhau phù hợp với từng quy trình y tế khác nhau. Quan trọng là chọn bơm tiêm phù hợp cho quy trình thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng:

Thực hiện quy trình tiêm theo kỹ thuật đã thiết lập.

Lưu ý:

1. Sử dụng các kỹ thuật vô trùng thích hợp khi xử lý. Sự hiện diện của không khí trong ống tiêm có thể gây ra những tác hại nguy hiểm như: tắc mạch hoặc trong trường hợp hiếm gặp là tử vong.
2. Tất cả các kết nối nên được giữ chặt bằng tay. Quá chặt có thể dẫn đến các vết nứt và rò rỉ có thể dẫn đến tắc mạch và / hoặc tiếp xúc các hóa chất nguy hiểm.
3. Sau khi kết nối, xác minh không có rò rỉ bằng cách hút. Rò rỉ có thể dẫn đến tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.
4. Sau khi sử dụng bơm tiêm xử lý phải phù hợp với yêu cầu của luật pháp và quy định của địa phương

Cảnh báo:

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
2. Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hại
3. Không sử dụng nếu sản phẩm quá hạn dùng
4. Không tái sử dụng thiết bị. Thiết bị đã qua sử dụng có thể dẫn đến ô nhiễm và / hoặc suy yếu năng lực chức năng. Ô nhiễm và / hoặc chức năng hạn chế của thiết bị có thể dẫn đến thương tích, bệnh tật hoặc tử vong của bệnh nhân
5. Không nên sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được đề cập.

Bảo quản:

Lưu trữ sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn và để ở chỗ sạch sẽ kho ráo và không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.