

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ KẾT NỐI

Hướng dẫn sử dụng:



Ký hiệu:

	Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide		Sản phẩm không có Latex
	Mã lô hàng		Sản phẩm có phthalates (DEHP)
	Mã sản phẩm		Sản phẩm không có DEHP
	Hạn sử dụng		Bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo
	Không tái sử dụng		Tránh xa ánh nắng mặt trời
	Ngày sản xuất		Không sử dụng khi bao bì bị hư hỏng
	Nhà sản xuất		Tham khảo HDSD trước khi sử dụng

Mục đích sử dụng của sản phẩm:

Dụng cụ kết nối 2, 3, 4 cổng được khuyến nghị dùng để kết nối và kiểm soát dòng chảy của nhiều dòng dung dịch khác nhau trong các thủ thuật y tế hoặc cho các thiết bị khác nhau.

Miễn trừ trách nhiệm:

Các chỉ dẫn sau đây liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng sản phẩm và người sử dụng nhất thiết phải qua đào tạo. Các chỉ dẫn này không đại diện hết cho các hướng dẫn y khoa và không thể thay thế cho lời khuyên cũng như các phán đoán của bác sỹ.

Hướng dẫn sử dụng:

Kiểm tra nhãn để biết áp suất tối đa của thiết bị và bảo đảm nó phù hợp với hệ thống được sử dụng.

Thiết lập, xả và thông hơi hệ thống theo quy trình của bệnh viện hoặc quy trình của các thiết bị.

Dấu trên tay cầm cho biết khi nào ống thông mở ra để cho dung dịch chảy vào.

Đề phòng:

1. Sử dụng các kỹ thuật vô trùng thích hợp khi sử dụng thiết bị.
2. Sự hiện diện của không khí trong hệ thống có thể dẫn đến tắc mạch và trong trường hợp hiếm gặp là tử vong.
3. Tất cả các kết nối nên được giữ chặt bằng tay. Quá chặt có thể dẫn đến các vết nứt và rò rỉ có thể dẫn đến tắc mạch và / hoặc tiếp xúc các hóa chất nguy hiểm. Sau khi kết nối, xác minh không có rò rỉ bằng cách hút. Rò rỉ có thể dẫn đến tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.
4. Không sử dụng các dung dịch chứa lipid vì chúng có thể gây rò rỉ. Rò rỉ có thể dẫn đến tiếp xúc với vật liệu nguy hiểm sinh học.
5. Sau khi sử dụng thiết bị phải xử lý phải phù hợp với yêu cầu của luật pháp và quy định của địa phương/đơn vị.

Cảnh báo:

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
2. Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hại
3. Không sử dụng nếu sản phẩm quá hạn dùng
4. Không tái sử dụng thiết bị. Việc tái sử dụng thiết bị sẽ tạo ra nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Điều này có thể dẫn đến nhiễm bẩn và / hoặc suy giảm khả năng hoạt động. Việc nhiễm bẩn và / hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể dẫn đến thương tích, bệnh tật hoặc tử vong cho bệnh nhân.
5. Không nên sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được đề cập.

Bảo quản:

Lưu trữ sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn và để ở chỗ sạch sẽ khô ráo và không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.